

Zkope HealthCare

Wij maken het meten van uw bloedglucose
betrouwbaar en betaalbaar.



i-SENS, Inc.

27-36, Gwangun-ro, Nowon-gu,
Seoul 139-845, Korea
www.i-sens.com



Medical Technology Promedt
Consulting GmbH,
Altenhofstrasse 80, D-66386
St. Ingbert, Germany

Klantenservice

Nederland

Zkope HealthCare BV
Leemkuil 23
6151 DD Munstergeleen
Tel.: 00 31 467 507 707

www.zkopehealthcare.com
www.myglucosemonitor.nl

Gebruiksaanwijzing

CareSens™ N

Bloed Glucose Monitoring



Eenvoudig & nauwkeurig



Zeer kleine bloeddruppel
(● : Op ware grootte)



Snel testresultaat



Zkope HealthCare BV

Wij maken het meten van uw bloedglucose
betrouwbaar en betaalbaar.

Zkope HealthCare dankt u voor het kiezen van de CareSens N bloedglucose meter.

Pas op!

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het systeem en het gebruik ervan. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door voordat u uw nieuwe systeem gaat gebruiken.

De CareSens N bloedglucose meter is ontworpen voor uw gemak en is zeer gebruiksvriendelijk. Het meet uw bloedglucose in vitro (buiten uw lichaam) in slechts 5 seconden en d.m.v. 0,5 μ L bloed.

Bloedglucose management speelt in de diabetes therapie een zeer belangrijke rol. Uitgebreide studies hebben bewezen dat complicatie-risico's verminderen wanneer het bloedsuiker niveau binnen het normaalbereik gehouden wordt.

Voordat u gaat beginnen is het belangrijk de garantie-registratiekaart in te vullen die bij de verpakking ingesloten is en deze aan ons retourneert. Hiermee helpt u ons om u een betere service te bieden.

Wij wensen u veel succes met het managen van uw diabetes!