

Draadloze connectiviteit



Meterknop

Indicator
streefwaardenbereik

Inbrengplaats teststrip

Teststrip

Bloedglucose meten



Was je handen altijd goed met warm water en zeep en droog deze grondig af voordat je een test start. De meter wordt ingeschakeld als je de strip in de meter steekt. Het metalen uiteinde van de strip moet in de meter worden gestoken.



Als een knipperend druppel-symbool verschijnt, moet een vingerprik met de prikpen worden uitgevoerd.



Breng het druppeltje bloed aan op de gele rand van de teststrip. Verwijder je vinger van de teststrip als het knipperende zandlopersymbool op de display verschijnt.




Het testresultaat verschijnt binnen 4 seconden op de display. De pijl geeft aan of je testresultaat boven, binnen of onder het streefwaardenbereik ligt. Het streefwaardenbereik kan individueel worden aangepast aan je persoonlijke behandelingsdoelstellingen.


Accu-Chek® Instant in combinatie met de mySugr app

Snel, makkelijk, betrouwbaar

Zes simpele stappen

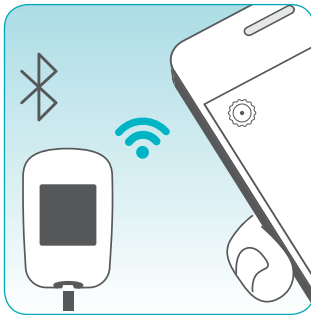


1. Ga naar instellingen op je smartphone en schakel Bluetooth in.

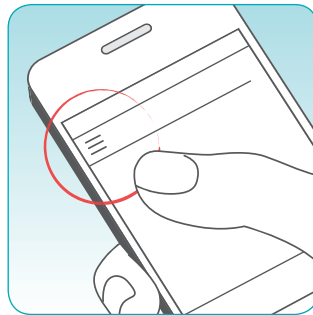


2. Open de mySugr app en selecteer 'verbindingen' in het menu.




3. Selecteer Accu-Chek Instant in de lijst.

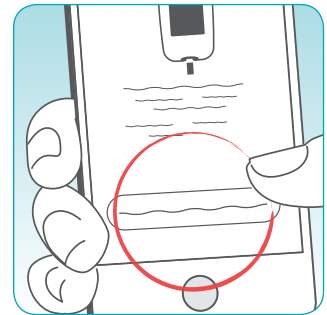

4. Klik op 'verbinden'. Volg nu de instructies die op het scherm verschijnen.

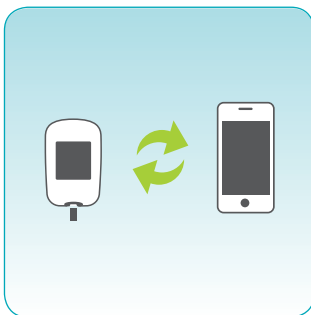

5. Na een succesvolle activatie van de meter worden de glucosewaarden automatisch gesynchroniseerd met mySugr.

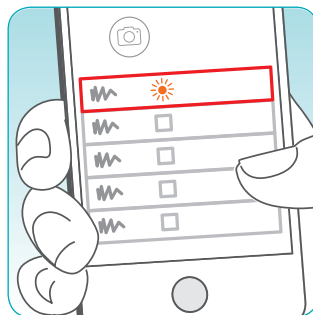

6. Na het koppelen met mySugr worden je metingen direct overgebracht naar de app.

OPGEPAST: De eenheden waarmee de glucose gemeten wordt (mmol/L) moeten in de glucose-meter en in de instellingen van de mySugr app gelijk zijn. Anders is data synchronisatie niet mogelijk. Indien de instellingen niet gelijk zijn, kan dit worden aangepast in de mySugr app.

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK INSTANT zijn handelsmerken van Roche.
mySugr is een handelsmerk van mySugr GmbH.



www.accu-chek.nl
0800 – 022 05 85
Roche Diabetes Care Nederland BV
Transistorstraat 41
1322 CK Almere

ACCU-CHEK®